

KÄYTTÖOHJEET – PRECORDIOR AF APP

Yleistä

Precordior AF App -mobiilisovellus on tarkoitettu sydämen eteisvärinän tunnistamiseen. Mittauksessa seurataan sydämen toimintaa rintakehän liikkeiden perusteella.

Mittaustapahtuma

Riisu rintakehä paksusta vaateuksesta. Asettaudu selinmakuulle. Ota mukava asento, sillä mittaus kestää noin minuutin. Käynnistä mittaus painamalla Aloita-painiketta. Käynnistystä seuraa 10 sekuntia kestävä lähtölaskenta. Lähtölaskennan aikana aseta laite rintakehän päälle. Mittauksen alettua äänimerkit viestivät mittauksen etenemisestä. Tiedät mittauksen olevan valmis, kun kuulet hälyttävän äänimerkin. Tällöin voit nostaa puhelimen pois rintakehältä. Tuloksen tulkinta käynnistyy heti mittauksen päätyttyä. Tulokset esitetään verkkoyhteyden nopeudesta riippuen noin minuutin kuluttua mittauksen päättymisestä.

Tulokset

Mittaustulos kertoo sinulle mitatun sykkeen, arvion eteisvärinän mahdollisuudesta sekä suosituksen jatkotoimenpiteille. Mikäli mittauksessa on ongelma, tapahtuma saattaa keskeytyä ennen aikaisesti. Tällöin sovellus pyytää aloittamaan mittauksen uudelleen alusta. Myös mitattuaan tuloksen, jonka perusteella voidaan epäillä eteisvärinää, sovellus pyytää tekemään uuden mittauksen. Tuloksia ei välitetä automaattisesti muille tahoille. Siksi on tärkeää, että käyttäjä itse huolehtii mahdollisista jatkotoimenpiteistä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Mittaushistoria

Kaikki mittaukset tallentuvat automaattisesti mittaukshistoriaan. Yksittäisiä mittauksia voi tarvittaessa poistaa mittauksetuloksen näkymästä.

Lisätietoja palvelustamme

Onko sinulla kysyttävää palvelustamme? Asiakaspalvelumme palvelee sinua osoitteessa info@precordior.com.

Julkaisija: Precordior Oy, Suomi.

Yhteystiedot:

Osoite: Itäinen Pitkäkatu 4, 20520 Turku, Suomi.

Puh.: +358 50 302 3366

Sähköposti: info@precordior.com

Verkkosivusto: <http://www.precordior.com>

CE XXXX

Ilmoitettu laitos: Eurofins Expert Services Oy, Suomi, ID 0537